

LIFEPAK[®] CR2-defibrillator

Aanvullende gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de *gebruiksaanwijzing van de LIFEPAK CR2-defibrillator* voor volledige instructies voor gebruik.

Waarschuwing

Voortijdige batterijontlading. Als het deksel of de magneet van het deksel ontbreekt, kan de LIFEPAK CR2-batterij voortijdig leeg raken.

Tips voor probleemoplossing

In deze tabel worden de probleemsituaties uitgelegd die u kunt tegenkomen als u de defibrillator gebruikt.

| WAARNEMING | MOGELIJKE OORZAAK | CORRIGERENDE HANDELING |
|---|--------------------------------|--|
| Er zijn geen stemmeldingen of pieptonen te horen nadat u het deksel van de defibrillator hebt geopend (schakel hem in). | Dekselmagneet ontbreekt | <ul style="list-style-type: none">• Gebruik de AAN/UIT-knop om de defibrillator in te schakelen als deze nodig is voor gebruik in noodgevallen.• Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel. |
| | Lege batterij | <ul style="list-style-type: none">• Vervang de batterij onmiddellijk. Bestel onmiddellijk een nieuwe batterij als er geen vervangende batterij beschikbaar is. |
| | Storing in luidspreker-systeem | <ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel. |
| De gesproken instructies gaan door nadat het deksel is gesloten. | Dekselmagneet ontbreekt | <ul style="list-style-type: none">• Gebruik de AAN/UIT-knop om de defibrillator uit te schakelen.• Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel. |